

Подбор размеров.

Размерный ряд	S	M	L
Размер обуви	34-36	37-40	41-44

Ограничения и противопоказания

Не использовать при открытых и мокнущих ранах.

Уход

Бандажи не реже раза в неделю необходимо мыть теплой водой (не более 40°С) с детским мылом, после чего сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Условия утилизации

Изделия могут быть утилизированы с бытовым мусором, пластиковый блистер и бумажный вкладыш могут быть подвергнуты повторной переработке.

Срок годности

При хранении в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей срок годности составляет 5 лет. Изделия не представляют угрозу после окончания срока годности.

Срок службы

не определен.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.15.944.Д.001137.01.10 от 27.01.10 г.

Производитель: ФРЕСКО ПОДОЛОГИЯ С.Л. С/Сицилия, 143 08013, Барселона (Испания).

Импортер: ООО "Орто Медикл Групп", Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт. INTFK-DANS-N3

DANS

Бандаж корригирующий ночной
при осложнении плоскостопия - вальгусной
деформации большого пальца стопы.



Назначение


Консервативное лечение осложнений поперечного плоскостопия, начальная и средняя степени нефиксированного Hallux Valgus (вальгусная деформация - отклонение к наружи I-ого (большого) пальца стопы) и период реабилитации после хирургических операций по поводу Hallux Valgus.

Оказываемый эффект

Приостанавливает развитие деформации суставов большого пальца, нормализует тонус связок и мышц стоп для создания физиологически правильного положения больших пальцев стоп.


Конструкция ночного бандажа DANS

1. Упор для большого пальца
2. Накладка на сустав большого пальца
3. "Рожки" бандажа
4. Лента застежки - липучки

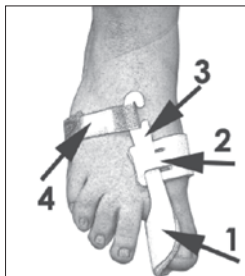

Способ применения

Бандажи применяют во время ночного отдыха (сна), на фоне расслабления скелетной мускулатуры. По назначению врача бандажи могут быть использованы в послеоперационном периоде для постоянного ношения в сроки, установленные лечащим врачом.

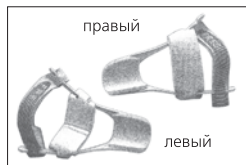

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием определите правое и левое изделие (См. Рисунок)

Способ надевания

Расстегните ленту застежки - липучки (4). Возьмите бандаж в руку, так чтобы "рожки" бандажа (3) были направлены в сторону пятки. Аккуратно наденьте бандаж на большой палец так, чтобы упор для большого пальца (1) находился между первым и вторым пальцами ноги.




Плотно прижмите "рожки" (3) к подошвенной и тыльной поверхностям стопы.



Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхностям стопы.

Упор (1) должен плотно прилегать к наружной поверхности большого пальца.

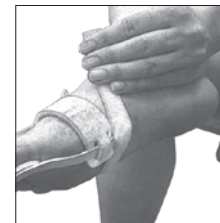

Оберните ленту застежки-липучки (4) вокруг наружного края стопы и зацепите ее за прорезь "рожка" на подошвенной поверхности стопы.

Обратите внимание, чтобы при этом сам бандаж не смещался.



Протяните ленту застежки-липучки (4) к наружному краю стопы и застегните бандаж. Натяжение ленты застежки-липучки регулирует степень отведения большого пальца. После застегивания липучки проверьте правильность положения бандажа.